

Interface anti-contention

400-134 Système Éclipse



Spécifications Générales

- Installation flexible et rapide grâce au câblage CAT5e/6 et des connexions RJ12.
- Montage sur boîtier électrique standard 1 groupe (1 X BC1004-L).
- Mode auto-diagnostique qui permet de valider le câblage jusqu'au poste de chambre ou multifonction..
- Facile à raccorder à un tapis anti-contention, de lit ou de fauteuil par connecteur RJ22.
- 3 indicateurs visuels de statuts. Bouton de réinitialisation (Reset).
- Certifié UL1069 (Fichier E350213)

Fonctionnalités

Ce module permet l'intégration et la gestion de tapis anti-contention, de lit ou de fauteuil au système Éclipse de Luvicom. Le raccordement du tapis se fait par un connecteur RJ10.

Il comprend 3 indicateurs visuels de statuts permettant, à l'aide du manuel simplifié, une utilisation facile par le personnel soignant.


- DEL d'état de l'appel.
- DEL d'état de l'alimentation.
- DEL d'état en service.


Un bouton permet l'annulation locale de l'alerte et la remise en fonction du module.

Le cycle de détection d'un appel ne débute qu'après la détection initiale du tapis.

Une supervision du senseur indique s'il est débranché ou défectueux.

Pour éviter les faux appels lors de mouvement du patient, le module comprend un délai d'activation ajustable par cavalier variant de 3, 6, 9 ou 12 secondes.

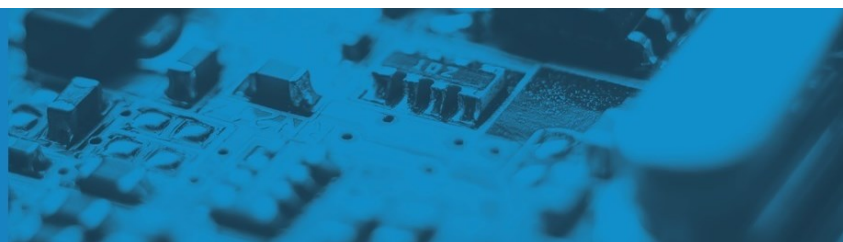

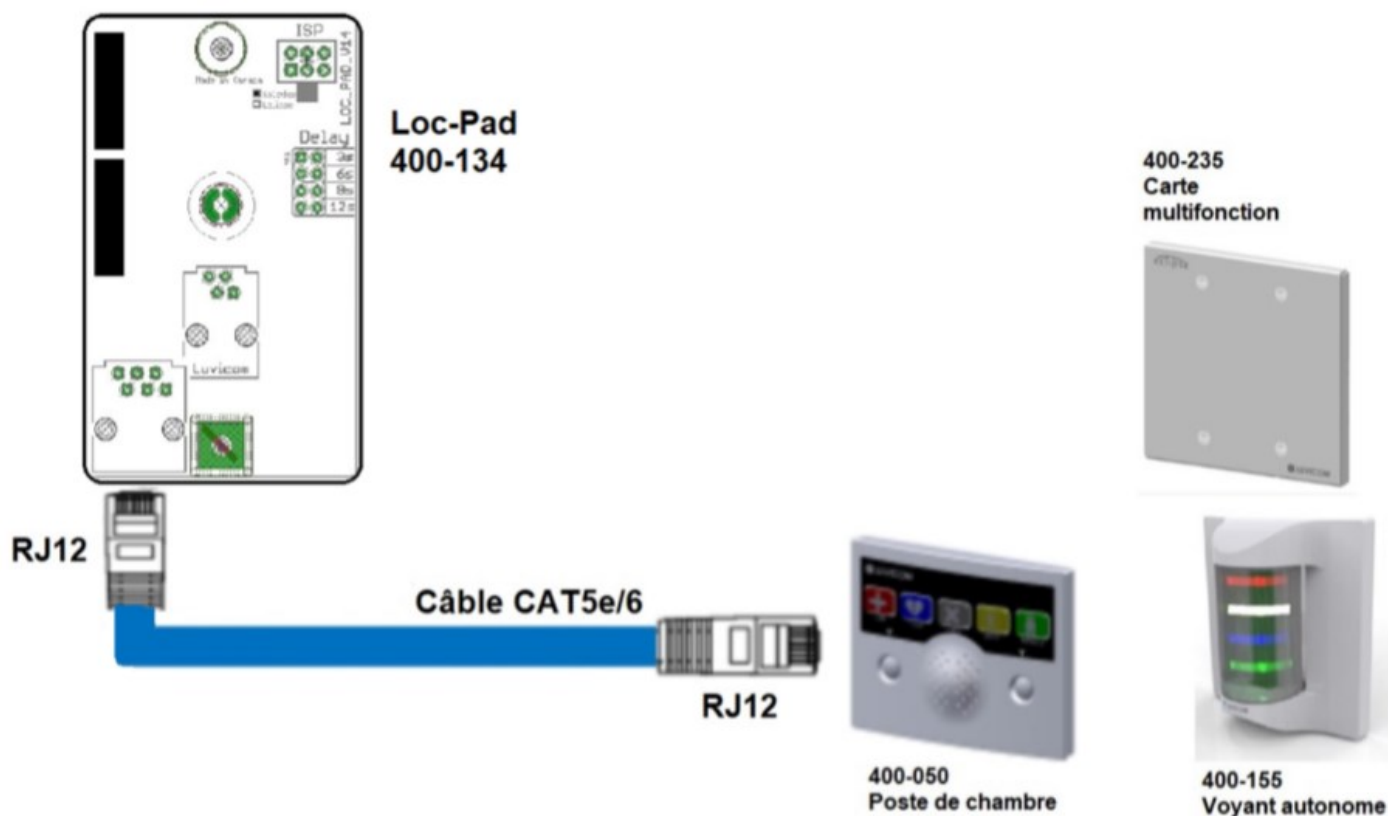

Spécifications électriques	Entrée : 5VDC, 5.75mA
Fixations	Boite électrique standard 1-Groupes (2 X BC1004-L)
Entrées - Sorties	1 x RJ-12 jusqu'au poste de chambre, de devoir ou multifonction 1 X RJ-11 jusqu'à l'équipement anti contention
Platine	Plaque de métal émaillé blanc
Dimensions	129 mm (5.0") de Haut 71 mm (2.8") de largeur 40 mm (1.57") de profondeur

