

Voyant de zone multi-couleur

400-161
Système Éclipse



Spécifications Générales

- Installation flexible et rapide grâce au câblage CAT5e/6 et des connexions RJ45.
- Montage sur boîtier électrique standard 2 groupes (2 X BC1004-L)
- Très bonne visibilité sous tous les angles (180°).
- Rétro-compatible avec les voyants de générations précédentes
- Huit (8) couleurs d'intensité ajustable.

Fonctionnalités


Le voyant de zone peut être configuré pour avoir deux modes opératoires distincts:

Le premier mode opératoire, qui est utilisé habituellement, est le mode dit « par priorité ». Dans ce mode, il supporte ses 8 couleurs. Les types d'appel en cours des postes et groupes associés à ce voyant sont signalés par couleur de la même manière qu'un voyant de corridor le ferait pour son poste de chambre.

Le second mode opératoire est le mode « par zones ». Dans ce mode, seules les couleurs de base blanc, bleu, vert et rouge sont utilisées pour couvrir 4 zones. Le voyant indique via ces couleurs la zone de provenance d'un appel.

L'installation est simplifiée par l'utilisation d'un connecteur RJ45 et de câble CAT5e/6.

Le mode auto-diagnostic est aussi toujours actif et alerte l'infirmière s'il y a un trouble dans le câblage.

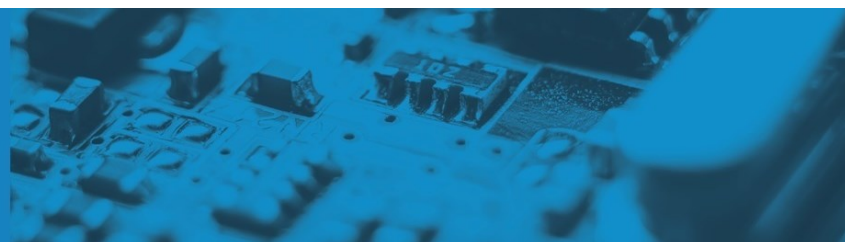



Voyant de zone multi-couleur

400-161
Système Éclipse



Fonctionnalités (suite)

En mode « par priorités », chaque segment du voyant de zone multi-couleur peut diffuser une variété de 8 couleurs clairement identifiables par le personnel.

Chaque segment de couleur peut avoir un de ces comportements :

- Simplement allumée
- Clignotant lentement ou rapidement
- Oscillant verticalement lentement ou rapidement


L'intensité lumineuse du voyant est programmable par logiciel.

Les couleurs et leur comportement, lors d'appel, sont complètement programmables selon les exigences de l'établissement.

Exemples, on pourrait programmer :

- Blanc-clignotant-lent pour appel patient
- Rouge oscillant-lent pour appel code rouge
- Rose oscillant-rapide pour appel code rose
- Orange clignotant-lent pour un appel toilette
- Magenta clignotant-rapide pour appel pad de lit
- Vert allumée pour présence infirmière



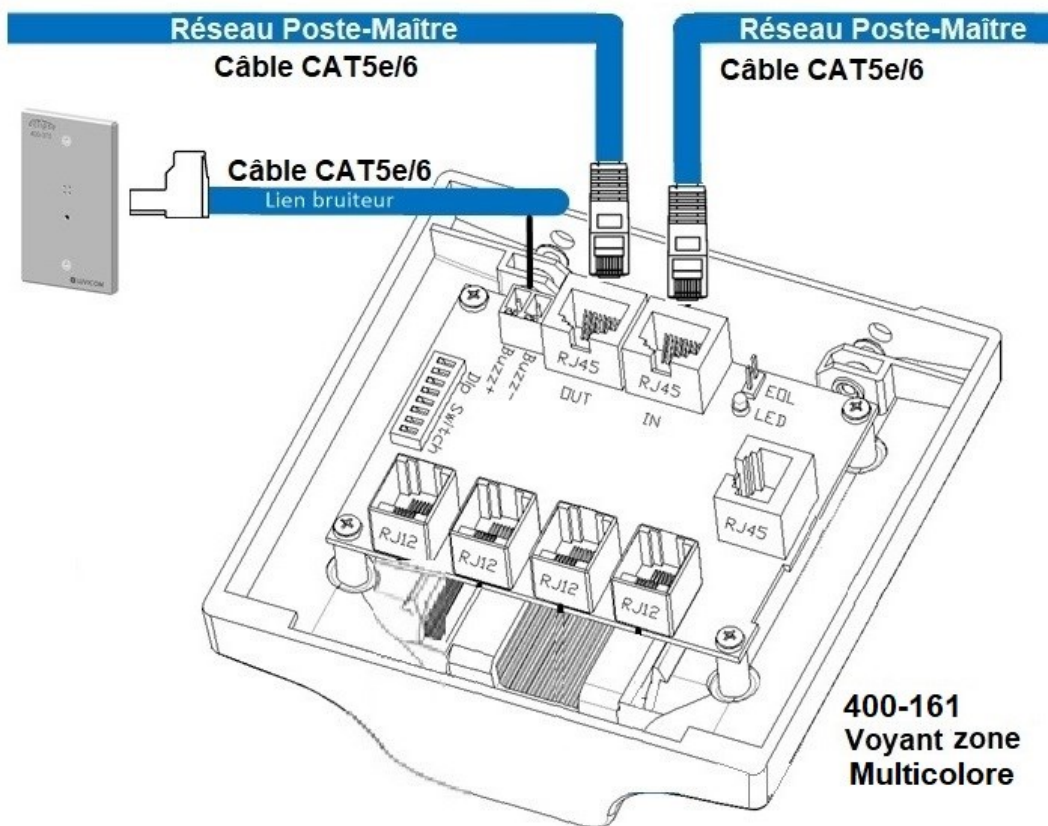

Spécifications électriques	Entrée : 5VDC, 750mW maximum
Fixations	Boite électrique standard 2-Groupes (2 X BC1004-L)
Entrées - Sorties	1 x RJ-45 jusqu'au poste de chambre
Luminosité	Jusqu'à 800 MCD
Platine	Plastique ABS blanc UL94-V0 Acrylique translucide UL94-V0
Dimensions	4.6" (117 mm) Haut. x 4.6" (117 mm) Larg. x 1.9" (48 mm) Prof.

Note:

Quoique présents, les 4 connecteurs RJ12 ne peuvent être utilisés sur ce modèle de voyant.

Il peut remplacer directement le model 400-160. Il aura, par défaut, le même comportement.

